

Elettroporazione

Premere il tasto F1. Seguirà la schermata con 5 programmi, tramite i tasti inc/dec selezionare un programma poi premere il tasto start.

A questo punto l'apparato è pronto per essere avviato. Comparirà la schermata con sfondo blu, dove abbiamo la regolazione della potenza degli impulsi di elettroporazione e la potenza di una corrente di ione foresi se la si vuole miscelare alla corrente portante.

Questi due canali out1 e out 2 sono rispettivamente per il collegamento del manipolo corpo e viso di elettroporazione.

Si può modificare il tempo di trattamento premendo il tasto F1 poi con i tasti inc/dec variare il valore.


Sul pannello comandi abbiamo coppie di tasti 1 e 2 per incrementare la potenza di elettroporazione canale 1 e 2 mentre la coppia tasti 3 serve per variare la potenza della ionoforesi del canale 1 e 2.

Per variare la ione del canale 1, premere solo una volta un tasto della coppia 1, poi variare la potenza con i tasti 3.


Per variare la ione del canale 2, premere solo una volta un tasto della coppia 2, poi variare la potenza con i tasti 3.

La frequenza è fissata a 2470 Hertz.


Fase 1

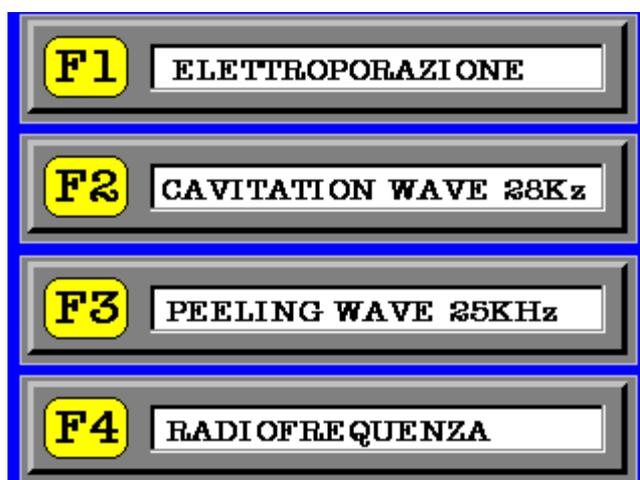

Fase2

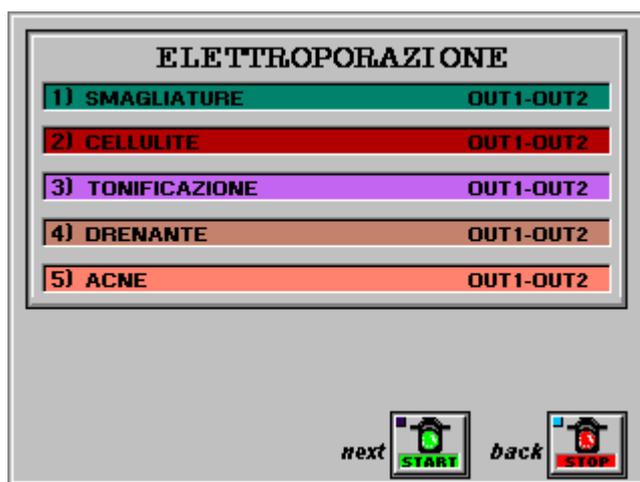

Fase3

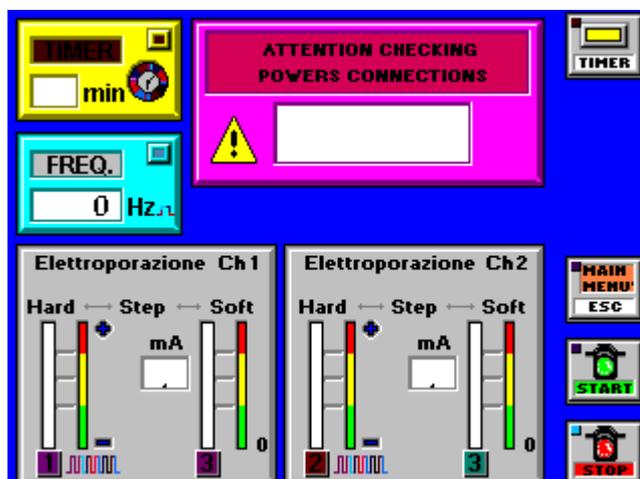

Per avviare il trattamento premere il tasto start , per arrestarlo momentaneamente premere stop una volta sola, ripremendo il tasto stop si termina il trattamento.

Dopo che il timer a finito di contare i minuti il trattamento si arresta automaticamente, seguirà un suono di avvertimento,premere stop per far terminare il suono.

Per ritornare al menù principale premere il tasto F4.
